

# Igiene Della Cavità Anoftalmica e Manutenzione Del Dispositivo Protesico.

La rimozione della protesi è consigliata almeno una volta al mese ,salvo casi particolari (infezioni congiuntivali o affezioni simili) dove è necessario, in accordo con il medico, rimuoverla più frequentemente.

Ricordiamo, comunque, che la protesi in resina acrilica è idrorepellente, presenta una superficie liscia anche dopo molto tempo e che è estremamente facile da pulire anche lasciandola in cavità: **è sufficiente bagnare una garza di cotone con un pò di soluzione fisiologica sterile e premere ripetutamente sulla superficie anteriore della protesi, in modo da far uscire la secrezione eventualmente accumulatasi dietro di essa.** Questa operazione, ripetuta due o tre volte al giorno, dà sufficienti garanzie di igiene e comfort.

Inoltre si consiglia di evitare che la protesi entri a contatto con sostanze tipo: alcool, amuchina, acido borico, pomate, detersivi particolarmente aggressivi.

Non sterilizzare chimicamente né termicamente .

Si consiglia in presenza di patologie quali: congiuntivite, raffreddore, infiammazioni delle vie respiratorie in genere, di tenere aumentata la frequenza della pulizia del dispositivo, e comunque di chiedere sempre consulto al medico.

Come si toglie il dispositivo:

